

## FERRİTİN KONTROL SET

REF: VT-041	Ferritin Kontrol Seviye I	5 x 1 mL
REF: VT-042	Ferritin Kontrol Seviye II	5 x 1 mL

*Kullanma talimatı içerisinde yapılan değişiklikler gri ile işaretlenmiştir.*

Prospektüsteki talimatlar dikkatle takip edilmelidir. Talimatlarda herhangi bir sapma olursa tahlil sonuçlarının güvenilirliği garanti edilemez.

**KULLANIM AMACI**

Ferritin Kontrol Seviye I ve Ferritin Kontrol Seviye II, Ferritin testinin kalite kontrolü içindir.

**İÇİNDEKİLER / SAĞLANAN MALZEMELER**

Validity Ferritin Kontrol Seviye I

**REF: VT-041**

Ambalaj: 5 x 1 mL **Likit**

Validity Ferritin Kontrol Seviye II

**REF: VT-042**

Ambalaj: 5 x 1 mL **Likit**

**Beraber Kullanılmak Üzere:**

Validity Ferritin Reaktif,  
Validity Ferritin Kalibratör.

**VT-041 / VT-042** insan serumu içermemektedir.

Sodyum Azid (%0,09), koruyucu madde olarak ilave edilmiştir.

**KONTROLÜN STABİLİTESİ**

Sıcaklık-Şartlar	Stabilite Süresi
Açılmamış, +2/+8°C'de, ışıktan korunan	Şişenin üzerindeki son kullanma tarihine kadar
Açılmış, +2/+8°C'de, ışıktan korunan	7 gün

**KONTROLÜN HAZIRLANMASI**

Kontrol kullanım için hazırdır.

**KARARSIZLIK VE BOZULMA BELİRTİLERİ**

Aşırı bulanıklık ve mikrobiyal büyüme varlığı ve bozulma belirtisi olabilir.

**ÖNLEMLER**

İnsan kaynaklı materyal. Potansiyel bulaşıcı gibi davranınız. Bu ürünün hazırlanmasında kullanılan her plazma donör FDA onaylı bir yöntemle test edilmiştir ve HIV 1/2 HBsAg, HCV, HIV-Ag antikor varlığı için negatif bulunmuştur. Ancak bilinen test yöntemlerinin hiçbirisi hepatit B virüsü, Human Immunodeficiency Virus (HIV) veya enfeksiyöz ajanlar bulunmadığına tam güvence sunamaz. Tüm insan kaynaklı ürünler uygun önlemler alınarak İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice - GLP) ilkelerine uygun şekilde kullanılmalıdır. Güvenlik Bilgi Formuna [www.validity.com.tr](http://www.validity.com.tr) 'den ulaşabilirsiniz veya yerel temsilcinize başvurabilirsiniz.

**UYARILAR**

IVD: In Vitro Diagnostik kullanım içindir.

Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayınız.

Farklı iki lot numaralı reaktif birbirine karıştırılmamalıdır.

Profesyonel kullanım içindir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) ilkelerine uyunuz.

Sodyum azid içerir.

**DİKKAT:** Bu ürün ile birlikte insan kaynaklı örnekler işleme alınmaktadır. İnsan kaynaklı örneklerin tümü potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilir ve OHSAS standartlarına uygun olarak ele alınması tavsiye edilmektedir.

**Tehlike**

H317 :Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

**Önlem**

P280 :Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / gözlük / maske kullanınız.

P264 :Kullandıktan sonra elinizi uygun şekilde yıkayınız.

P272 :Kirlenmiş iş kıyafetinin iş yeri dışında kullanımına izin verilmemelidir.

**Müdahale**

P302+P352 :Deri ile temasta bol sabun ve su ile yıkayınız.

P333+P313 :Deriyi tahriş eder ya da kızarıklık meydana gelirse tıbbi yardıma başvurunuz.

P362+P364 :Kontamine olmuş giysiyi çıkarınız ve kullanmadan önce uygun şekilde yıkayınız.

## FERRİTİN KONTROL SET

# Tr

### İmha

P501 :İçerikleri ve kapları yerel düzenlemelere göre atınız.

### REFERANSLAR

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tiets Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. St. Louis, MO, Elsevier Saunders; 2006:2263.
2. Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens. (29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register. July 1, 2001; 17:260-273.
3. Directive 2000/54/EC. Official Journal of the European Communities No. L262 from October 17, 2000.
4. Tietz, N. W. (1983) Clinical guide to Laboratory Tests, p384 W.B. Saunders Co., Philadelphia.



**Archem Sağlık Sanayi ve Tic. A.Ş.**  
(Validity Sağlık Hiz.Sanayi A.Ş Şirketi ile resmi sözleşmeye dayalı üretim anlaşması)  
Mahmutbey Mah. Halkalı Cad. No:124 Kat:4  
Bağcılar/İstanbul/Türkiye  
Tel: + 90 212 444 08 92  
Fax: +90 212 629 98 89  
info@archem.com.tr www.archem.com.tr  
info@validity.com.tr www.validity.com.tr



### SEMBOLLER

IVD

In Vitro Diagnostik Medikal Cihaz

LOT

Lot Numarası

CONTROL

Kontrol

GTIN

Küresel Ticari Ürün Numarası

REF

Referans Numarası

FOR USE WITH

Birlikte Kullanılacak Ürünleri Tanımlar

PRODUCT OF TURKEY

Türkiye Ürünü



Üretici



Son Kullanma Tarihi



Sıcaklık Sınırlaması (Saklama Şartları)



Kullanım Kılavuzuna Bakınız



Dikkat



Test Sayısı